

Артикул:

7330304507138ДЕТСКИЙ

Наименование:

ДЕТСКИЙ НАЗАЛЬНЫЙ АСПИРАТОР NoseFrida by Frida baby

Изготовитель:

Nasalprodukter Sverige AB, Адельгатан 21, SE-211 22 Мальмё, ШВЕЦИЯ. Назалпродуктер Свериге АБ, Адельгатан 21, SE-211 22 Мальмо, Швеция.

Страна производства:

Швеция

Рекомендации по использованию:

Положите ребенка на спину на пеленальный стол или на кровать. Можно посадить ребенка, при этом фиксируя его руки. Возьмите в рот красный мундштук NoseFrida и вставьте носик трубки в ноздрю ребенка. Используйте вторую руку, чтобы обеспечить неподвижность головы ребенка. Произведите всасывание. Если слизь густая или корочко-образная, закапайте физиологический раствор в носик ребенка перед процедурой. Очищайте NoseFrida после каждого использования. Отсоедините голубую трубку и промойте ее горячей водой с моющей жидкостью, а затем дайте трубке высохнуть. Поменяйте фильтр и присоедините трубку обратно. Плотнo закройте трубку крышкой до характерного звука. Не забывайте менять фильтр каждый раз после использования NoseFrida. Аспиратор NoseFrida можно использовать только для извлечения слизи из носа ребенка. Не предназначен для обработки ушей или горла. NoseFrida - это не игрушка. Держите все части аспиратора в недоступном для детей месте. Ни при каких обстоятельствах не присоединяйте NoseFrida к механическим или другим аспираторам или каким-либо устройствам. Не вдуйте воздух через красный мундштук, когда трубка находится в ноздре ребенка. Хранить при температуре от -20 °C до +35 °C.

Комплектация:

3 сменных фильтра входят в набор